

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

UŻYTKOWANIE

- Produkt przeznaczony jest dla osób z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu.
- Nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, bólu lub pogorszenia słuchu należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.

OCHRONA SŁUCHU

- Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Zaleca się stopniowe przyzwyczajanie do urządzenia, zaczynając od niższych poziomów wzmocnienia.

DZIECI I OSOBY ZALEŻNE

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie oraz jego elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci – istnieje ryzyko połknięcia małych części.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Do ładowania należy używać wyłącznie zalecanych przewodów i źródeł zasilania.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy lub przewodu ładowania.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą podczas ładowania.

WILGOĆ I TEMPERATURA

- Chronić urządzenie przed wilgocią, potem oraz bezpośrednim kontaktem z wodą.
- Nie używać w warunkach wysokiej wilgotności (np. sauna, prysznic).
- Unikać ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić urządzenie suchą, miękką ściereczką.
- Nie używać środków chemicznych ani alkoholu.
- Regularnie usuwać zanieczyszczenia (np. woskowinę), aby zachować prawidłowe działanie.

UŻYTKOWANIE MEDYCZNE

- Produkt nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki słuchu.
- W przypadku nagłego pogorszenia słuchu należy skonsultować się z lekarzem.

UTYLIZACJA

- Zużyte urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.