

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – POCO X903

Aby zapewnić sobie bezpieczne i komfortowe korzystanie z urządzenia POCO X903, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Przed pierwszym użyciem:

- Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
 - Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.
 - Przetestuj różne końcówki silikonowe i wybierz te najlepiej dopasowane do ucha – unikniesz dyskomfortu i gwizdu.
-

2. Podczas użytkowania:

- Nie wkładaj i nie wyjmuj urządzenia z ucha na siłę – może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu słuchowego.
 - Unikaj głośności przekraczającej Twoją strefę komfortu – nadmierna moc może uszkodzić słuch.
 - Nie udostępniaj swojego aparatu innym osobom – każde ucho jest inne.
 - Jeśli poczujesz ból, dyskomfort lub zawroty głowy – natychmiast wyjmij urządzenie i skontaktuj się z lekarzem.
-

3. Ochrona przed wilgocią i temperaturą:

- Nie używaj urządzenia podczas kąpieli, prysznica ani na basenie.
- Unikaj ekspozycji na deszcz i wysoką wilgotność.
- Nie pozostawiaj aparatu w nasłonecznionym miejscu, w aucie ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Jeśli urządzenie zamoknie – **nie włączaj go**, osusz je delikatnie i skonsultuj się z serwisem.

✓ 4. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść aparat regularnie suchą, miękką szmatką lub dołączoną szczoteczką.
- Nie używaj alkoholu, detergentów ani rozpuszczalników.
- Końcówki silikonowe można przemywać letnią wodą i dokładnie wysuszyć przed ponownym użyciem.

✓ 5. Ładowanie:

- Używaj wyłącznie dołączonego kabla USB-C i ładowarki.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu wody ani na łatwopalnych powierzchniach.
- Jeśli zauważysz przegrzewanie się urządzenia – natychmiast przerwij ładowanie.

✓ 6. Dla dzieci i osób z ograniczeniami:

- Urządzenie nie jest zabawką – trzymaj z dala od małych dzieci.
- Osoby starsze lub z ograniczeniami powinny korzystać z urządzenia pod opieką bliskich lub opiekuna.
- Nie pozostawiaj słuchawek bez nadzoru w miejscach dostępnych dla zwierząt.

✓ 7. Bezpieczeństwo na zewnątrz i w ruchu:

- W trybie Bluetooth z redukcją szumów zachowaj szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę lub jazdy rowerem – możesz nie usłyszeć otoczenia.
- Zawsze dostosuj głośność i tryb pracy do warunków zewnętrznych.

⚠ UWAGA:

To urządzenie nie zastępuje profesjonalnego aparatu słuchowego dobraneo przez protetyka słucho. W przypadku poważnych problemów ze słuchem zaleca się konsultację z lekarzem specjalistą.