

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do aparatów słuchowych Tingoton T55 UV

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie służy do osuszania i dezynfekcji (UV) aparatów słuchowych oraz drobnej elektroniki, takich jak:

- aparaty słuchowe
- procesory implantów ślimakowych
- słuchawki bezprzewodowe
- zegarki i opaski sportowe

Regularne stosowanie pomaga ograniczyć wilgoć, poprawić działanie urządzeń i wydłużyć ich żywotność.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- suszarka Tingoton T55
 - kabel zasilający USB
 - instrukcja obsługi
-

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: DC 5V (USB)
 - Tryby pracy: 2 godziny / 8 godzin
 - Temperatura pracy: ok. 40–45°C
 - Funkcja sterylizacji: światło UV LED (ok. 8 minut)
 - Materiał: ABS
-

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania USB (ładowarka, komputer, powerbank).
2. Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej i suchej powierzchni.
3. Otwórz pokrywę i sprawdź, czy wewnątrz jest czyste.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Otwórz pokrywę urządzenia
 2. Umieść aparat słuchowy lub inne urządzenie wewnątrz
 3. Zamknij pokrywę
 4. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb pracy
-

TRYBY PRACY

Tryb podstawowy (2 godziny)

- do codziennego osuszania
- zalecany po każdym dniu użytkowania

Tryb głęboki (8 godzin)

- do intensywnego osuszania
- zalecany przy dużej wilgotności lub po długim użytkowaniu

Urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu cyklu.

STERYLIZACJA UV

- Urządzenie wyposażone jest w lampę UV LED
 - Cykl sterylizacji trwa około 8 minut
 - Funkcja pomaga ograniczyć bakterie i drobnoustroje
-

WAŻNE ZASADY UŻYTKOWANIA

- Przed umieszczeniem aparatu wyłącz go
 - Nie wkładaj mokrych urządzeń ociekających wodą
 - Nie otwieraj pokrywy podczas pracy
 - Nie patrz bezpośrednio na światło UV
 - Używaj tylko z zasilaniem 5V USB
-

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką
 - Nie używaj środków chemicznych ani wody
 - Przechowuj w suchym miejscu
-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie włącza się:

- sprawdź połączenie do zasilania
- sprawdź kabel USB

Brak efektu suszenia:

- wybierz tryb głęboki (8h)
 - upewnij się, że pokrywa jest zamknięta
-

OSTRZEŻENIA

- Nie używać w pobliżu wody
 - Nie demontować urządzenia
 - Chronić przed dziećmi
 - Nie wystawiać oczu i skóry na działanie światła UV
-

UTYLIZACJA

Zużytego urządzenia nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
Oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego.