

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU – GPSR

Informacje o bezpieczeństwie użytkowania

Okulary słuchowe Vlike I11A są urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do wspomagania odbioru dźwięków w codziennym użytkowaniu. Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.
 - Produkt nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki ani leczenia problemów ze słuchem.
 - W przypadku bólu, dyskomfortu lub pogorszenia słuchu należy przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.
 - Nie należy używać produktu podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, jeśli może to ograniczać percepcję dźwięków otoczenia.
 - Nie używać produktu w środowisku o wysokiej wilgotności lub podczas kąpieli.
 - Nie narażać urządzenia na kontakt z wodą ani innymi cieczami.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.
-

Ostrzeżenia dotyczące poziomu dźwięku

- Długotrwałe korzystanie z wysokiego poziomu głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Zaleca się rozpoczynanie użytkowania od najniższego poziomu głośności i stopniowe zwiększanie według potrzeb.

- Nie należy używać urządzenia przy maksymalnym poziomie wzmocnienia przez długi czas.
-

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania należy używać wyłącznie kompatybilnych i sprawnych kabli oraz ładowarek.
 - Nie używać uszkodzonych przewodów ani adapterów.
 - Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas.
 - Nie używać urządzenia podczas ładowania, jeśli producent tego nie zaleca.
 - Chronić urządzenie przed przegrzaniem.
-

Bezpieczeństwo mechaniczne

- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
 - Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 - Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku upadku.
-

Warunki użytkowania i przechowywania

- Zalecana temperatura użytkowania: 0°C – 40°C
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Konserwacja i higiena

- Czyścić urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Regularnie sprawdzać stan elementów urządzenia.

Utylizacja produktu

Produkt zawiera elementy elektroniczne i podlega selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Nie wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych.

Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Okulary słuchowe z przewodnictwem kostnym

Model: Vlike I11A

Typ urządzenia: Elektroniczne urządzenie wspomagające odbiór dźwięku

Dane podmiotu odpowiedzialnego w UE

Dane osoby odpowiedzialnej za zgodność z przepisami w UE

Imię i nazwisko: Noah johnson

Adres: FR-39 Rue Cambronne, 75015 Paris, ile-de-FranceFrance

Adres e-mail: NoahHernandez@waveecrest.com

Numer telefonu: 587140810

Deklaracja zgodności użytkowania

Produkt przeznaczony jest do wspomaganie odbioru dźwięków w codziennym użytkowaniu i nie jest przeznaczony jako wyrób medyczny ani sprzęt diagnostyczny.