

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – Supermini Muse 1200P RIC

Zgodnie z wymaganiami **rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR)** dotyczącego bezpieczeństwa produktów ogólnego użytku, przedstawiamy zbiór zasad bezpiecznego użytkowania aparatu słuchowego **Muse 1200P RIC**.

1. Przeciwwskazania i środki ostrożności

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób z ubytkiem słuchu – nie stosować jako wzmacniacz dźwięku dla osób ze słuchem prawidłowym.
 - Nie używać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności (np. prysznic, sauna) – ryzyko uszkodzenia.
 - Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać aparatu słuchowego ani ładowarki – grozi porażeniem prądem lub trwałym uszkodzeniem.
 - Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt – zawiera małe elementy (końcówki, filtr), które mogą zostać połknięte.
 - Aparat nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach wymagających zgodności z ATEX (np. przestrzenie wybuchowe).
-

2. Bezpieczne ładowanie i użytkowanie akumulatora

- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej z urządzeniem – stosowanie niezgodnych zasilaczy może spowodować pożar lub uszkodzenie.
 - Nie ładuj aparatu w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 40°C.
 - Nie dopuszczaj do zamoczenia portu ładowania – przed podłączeniem upewnij się, że urządzenie i złącze są suche.
 - Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki, grzejnika).
-

3. Higiena i pielęgnacja

- Czyścić aparat słuchowy suchą, miękką szmatką – nie używaj alkoholu, detergentów ani wody.
 - Regularnie wymieniaj silikonowe końcówki douszne i czyść filtry dźwiękowe – zapobiega to infekcjom ucha i zapewnia właściwą jakość dźwięku.
 - Nie wkładaj brudnego aparatu do ucha – ryzyko zapalenia przewodu słuchowego.
-

4. Warunki przechowywania

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 0°C do 35°C.
 - Nie pozostawiaj aparatu na słońcu ani w zamkniętym samochodzie.
 - Podczas transportu zaleca się użycie oryginalnego etui ochronnego.
-

5. Zgłoszenia i odpowiedzialność producenta

- Produkt jest oznakowany **CE** i spełnia wymagania dyrektyw unijnych dla wyrobów medycznych oraz ogólnego bezpieczeństwa produktu.
 - W przypadku wad lub problemów związanych z bezpieczeństwem – użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub importerem.
 - Instrukcja stanowi integralną część dokumentacji produktu – należy ją zachować na przyszłość.
-

Kontakt w razie problemu

Importer/Dystrybutor:

MTRS SOUND

ul. Korzona 101 Apt. 30, 03-571 Warszawa

E-mail: sklep@mtrs.com.pl

Telefon: +48 517 331 407