

## **Informacja o bezpieczeństwie produktu (zgodna z GPSR 2023/988)**

**Produkt:** Cadenza H51 – Cyfrowy ładowalny aparat słuchowy BTE, Open-Fit

**Producent:** Austar Hearing Technology (Chiny)

**Kategoria:** Urządzenie elektroniczne wspomagające słyszenie (OTC)

**Klasyfikacja:** Klasa II (zgodnie z normami CE/ISO13485)

### **Środki ostrożności i bezpiecznego użytkowania:**

1. **Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.**
2. **Aparat przeznaczony jest dla osób z ubytkiem słuchu do 80 dB.** Nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki laryngologicznej.
3. **Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia** bez nadzoru osoby dorosłej.
4. **Nie należy stosować w przypadku stanu zapalnego ucha,** silnych zawrotów głowy lub wycieku z kanału słuchowego.
5. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, bólu lub reakcji alergicznej – **przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.**
6. **Nie narażaj aparatu na działanie wody, ognia, nadmiernej temperatury** (powyżej 40°C) ani silnych pól magnetycznych.
7. **Ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla i etui.** Nie używać uszkodzonych akcesoriów.
8. **Produkt zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.** Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.
9. **W przypadku aparatu używanego w obu uszach – zaleca się równoczesne noszenie obu urządzeń** w celu ochrony słuchu i zapewnienia właściwego pozycjonowania dźwięku.
10. **Produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna), 2011/65/UE (RoHS) oraz GPSR 2023/988 (bezpieczeństwo ogólne produktów).**