



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

GPSR – CADENZA E71

Instrukcja zgodna z wymogami GPSR (Ogólne Rozporządzenie o Bezpieczeństwie Produktów UE)

Aparat słuchowy **Cadenza E71** jest urządzeniem elektronicznym klasy OTC, zaprojektowanym z myślą o **bezpiecznym użytkowaniu, łatwej obsłudze i wysokiej jakości słyszenia**. Poniższe zalecenia mają na celu **zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika, prawidłową eksploatację, przechowywanie i konserwację urządzenia**.

1 UŻYTKOWANIE

- Aparat słuchowy należy **używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi**.
 - Urządzenie sterowane jest poprzez **aplikację mobilną Bluetooth** – użytkownik powinien umieć obsługiwać aplikację lub mieć osobę pomocną przy pierwszym ustawieniu.
 - Nie należy otwierać, demontować ani modyfikować aparatu.
 - Nie używaj aparatu w warunkach skrajnego ciepła lub zimna, ani w wilgotnym środowisku (kąpiel, prysznic, sauna).
 - Aparat nie jest odporny na wodę ani zanurzenie.
-

2 ŁADOWANIE I AKUMULATOR

- Ładowanie odbywa się wyłącznie w **dołączonym etui magnetycznym** lub za pomocą **oryginalnego kabla/ładowarki**.
- Nie używać ładowarek innych producentów, ani nie podłączać do napięcia wyższego niż 5V/1A.
- Nie narażać aparatu na przegrzewanie podczas ładowania (bezpośrednie słońce, grzejniki).

- Unikać kontaktu aparatu z wilgocią podczas ładowania.
-

3 PRZECHOWYWANIE

- Aparat należy przechowywać w **suchym, chłodnym miejscu**, najlepiej w dołączonym etui.
 - Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
 - Nie pozostawiać aparatu w miejscach narażonych na wstrząsy lub upadki.
-

4 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić delikatną, suchą szmatką lub specjalną ściereczką do elektroniki.
 - Nie używać środków chemicznych ani wody bezpośrednio na aparat.
 - Regularnie sprawdzać stan silikonowych końcówek i wymieniać je w razie zużycia.
-

5 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNE

- Aparat komunikuje się **wyłącznie lokalnie przez Bluetooth Low Energy (BLE)**.
 - **Nie korzysta z sieci komórkowych, GPS ani GPRS.**
 - Nie ma możliwości śledzenia użytkownika ani przesyłania danych do sieci.
-

6 UŻYTKOWNICY SZCZEGÓLNI

- Urządzenie **nie jest zabawką**.
- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób starszych lub dzieci – zapewnić pomoc przy konfiguracji aplikacji.

7 KONTAKT I WSPARCIE

- Instrukcja w języku polskim jest dostępna do pobrania z aukcji.
- Do aparatu dołączona jest **instrukcja w języku angielskim**.
- Aplikacja w języku angielskim jest **intuicyjna i łatwa w obsłudze**.
- W razie problemów prosimy kontaktować się z obsługą klienta.

8 UTYLIZACJA

- Aparat i akcesoria należy **poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami**.
- Nie wyrzucać baterii ani akumulatora do ogólnych odpadów.
- Zachować ostrożność przy utylizacji w celu ochrony środowiska.