

# Instrukcja Bezpieczeństwa

Aparaty Słuchowe TWS z Ładowaniem Magnetycznym  
(zgodne z GPSR 2023/988)

## 1. Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do wzmacniania dźwięku dla osób z osłabionym słuchem. Użytkowanie poza tym zakresem (np. jako zestaw słuchawkowy) jest zabronione.

## 2. Ostrzeżenia ogólne

- **Produkt nie jest zabawką.** Trzymać z dala od dzieci poniżej 12. roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Produkt zawiera małe elementy,** które mogą być ryzykiem zadławienia.
- **Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone** (np. pęknięcia, zniekształcenia, wyciek baterii).

## 3. Środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Przed pierwszym użyciem:** Zapoznaj się z całą instrukcją obsługi.
- **Nie reguluj głośności gwałtownie.** Zbyt wysoka głośność może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- **Nie nosić urządzenia podczas snu** (o ile lekarz nie zaleci inaczej).
- **Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie wody, deszczu ani bardzo wysokiej wilgotności.**

## 4. Ładowanie urządzenia

- **Używaj wyłącznie zalecanej ładowarki:** Wejście: AC100-240V 50-60Hz; Wyjście: 5V 1000 mA.
- **Nie używaj uszkodzonych kabli ani ładowarek.**

- **Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru** przez dłuższy czas po pełnym naładowaniu.
- **Ładuj urządzenie w suchym miejscu**, w temperaturze od 0°C do 45°C.

## 5. Przechowywanie i konserwacja

- **Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu**, z dala od ekstremalnych temperatur (poniżej -10°C lub powyżej 50°C).
- **Regularnie czyść zatyczki i urządzenie** miękką, suchą szmatką.
- **Nie używaj alkoholu ani agresywnych środków chemicznych** do czyszczenia.

## 6. W sytuacji awaryjnej

- Jeśli poczujesz dyskomfort, ból lub inne nietypowe objawy podczas używania aparatu słuchowego – **przestań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem**.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii (np. obrzęk, nienaturalne nagrzewanie) – **natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem**.

## 7. Utylizacja

- Produkt zawiera baterie litowe – **nie wyrzucać do zwykłego kosza**.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu urządzeń elektronicznych i baterii.

---

### Oświadczenie o zgodności:

Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2014/53/UE (RED), Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR) w odniesieniu do bezpieczeństwa wyrobów medycznych, oraz Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR) dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów.